

# PINCE MI

ACCESSOIRES POUR MASQUES DE PROTECTION  
CHIRURGICAUX OU TISSU

**ANTI BUÉE**

POUR PORTEURS DE LUNETTES

**+ DE MAINTIEN**

ET DE CONFORT

**+ ÉTANCHÉITÉ**

ET DE SÉCURITÉ



# PINCE MI, C'EST QUOI ?

## PLUS D'ÉTANCHÉITÉ : ANTI BUÉE

PINCE MI est un petit **accessoire anti buée pour les masques de protection** tissu ou chirurgicaux. Il permet de limiter la buée sur les lunettes de vue ou de travail lorsque l'on porte un masque de protection.

Nous proposons **deux types de solution** selon le type de masque à équiper :

- Une **solution à coudre** pour les masques en tissu
- Une **solution adhésive** pour les masques chirurgicaux ou certains masques tissu


## FONCTIONNEMENT

Certains masques de protection ne sont pas très étanches en partie haute, principalement les masques tissu. Les personnes portant des lunettes de vue ou de protection ont alors régulièrement des **problèmes de buée sur leurs lunettes**.


En respirant, l'air chaud que l'on expire est dégagé vers le haut du masque et provoque ainsi de la buée. En équipant son masque de PINCE MI, **le masque est ajusté sur le visage et l'étanchéité en partie haute est optimisée**. L'apparition de buée sur les lunettes est donc fortement réduite.



Port d'un masque sans PINCE MI

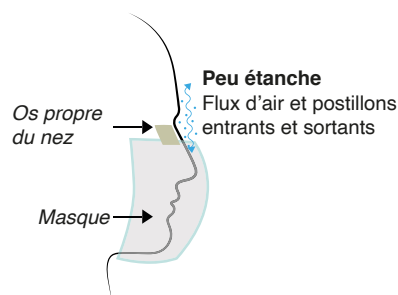

Port d'un masque avec PINCE MI

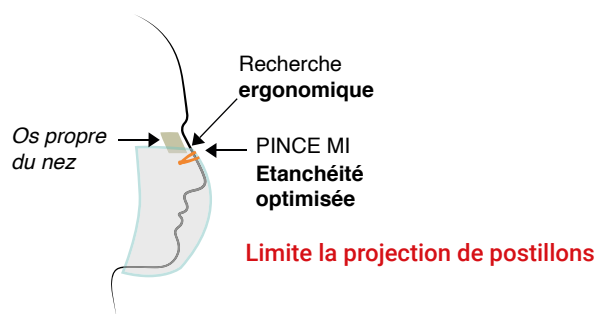


## PLUS DE MAINTIEN ET DE CONFORT

Pince Mi est un accessoire anti-buée mais pas que ! Il assure un meilleur maintien du masque sur le visage et réduit ainsi l'inconfort du port du masque.

Un masque de protection équipé d'un PINCE MI glisse beaucoup moins sur le visage. Vous n'êtes plus obligé de le replacer sans cesse, ce qui diminue considérablement les contacts entre les mains et le visage.



## PINCE MI ADHÉSIF : INSTALLATION

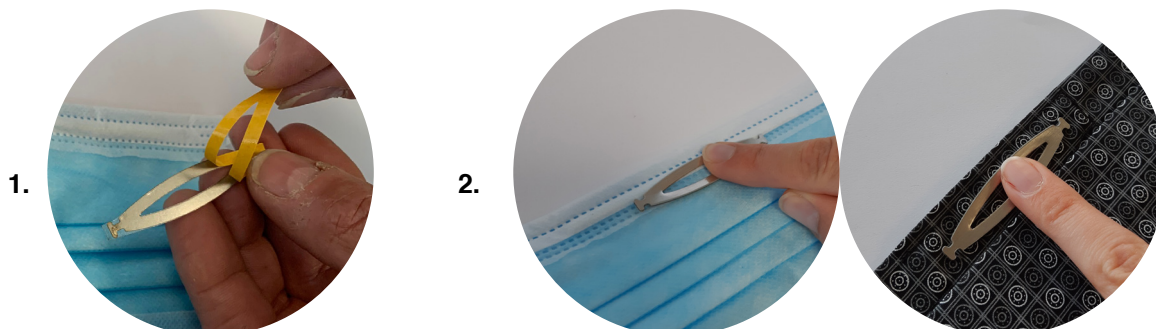

1. Ôter la protection du film autocollant du PINCE MI
2. Coller le PINCE MI à l'avant du masque sur la partie haute  
En fonction de la matière des masques et des conditions d'utilisation, Pince Mi Adhésif peut parfois être repositionné sur plusieurs masques. Nous ne garantissons qu'un seul collage.

### UTILISATION DU PINCE MI




Préformez le PINCE MI à l'aide de votre doigt.  
Le PINCE MI doit être correctement plié (centré et pas trop pointu) sinon son efficacité est altérée.



Installez le masque et ajustez le PINCE MI à la  
forme de votre nez en le pinçant

× Non centré

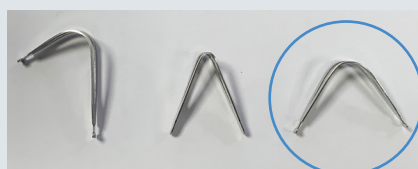

Pliage correct

× Trop pointu